

使用說明書

~

高低可調假牙工作檯


~

配件清單：

- a. M45 45k RPM 手機..... x1
 - b. 磁鐵..... x2
 - c. 放大鏡..... x1
 - d. 濾網 1 (金屬).....x1
 - e. 濾網 2 (集塵袋)..... x1
 - f. 濾網 3 (HEPA)..... x1
- (選配)
- g. 噴砂筆.....x1
 - h. 噴砂罐..... x1
 - i. 濾水罐..... x1



控制開關及旋鈕：

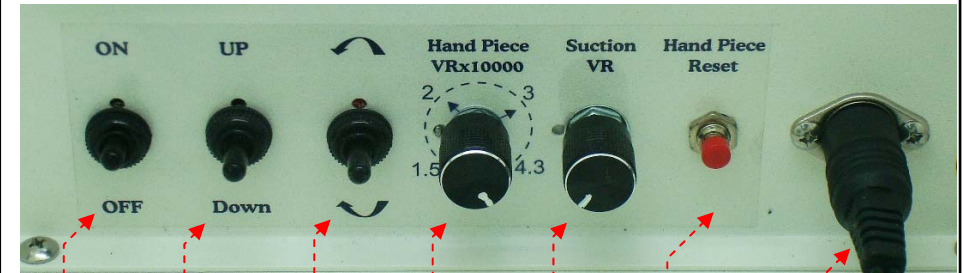

主電源開關

工作區高低調整

手機轉向調整

手機轉速調整



吸力強弱調整

手機重置鍵

手機控制板插槽



電源重置鍵

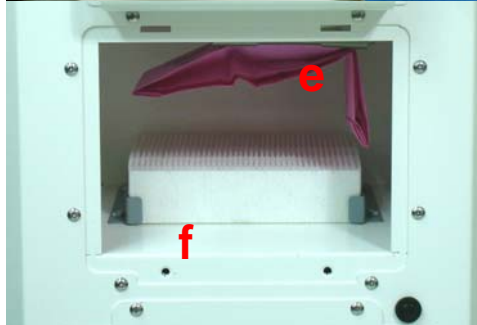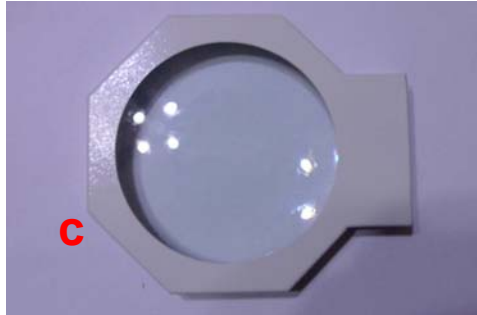

操作說明：

1. 控制面板

1. 確認適用電壓(110V 或 230V)並接上電源。



2. 向上打開電源開關，此時燈亮並可使用所有功能。



3. 向上或下調整工作箱高度。



4. 向上或下開始並選擇手機轉向。



5. 轉動右邊第二個旋鈕調整手機旋轉速度。



6. 轉動最右邊的旋鈕調整集塵吸力的強弱。



2. 研磨手機

1. 將手機尾端插頭接上於控制面板右側插座。




*請注意插頭上的定位凹點須對正插座位置。

2. 在變換手機旋轉方向時，請務必將開關至於中間並待手機停止旋轉後再選擇相反轉向。



3. 更換研磨工具

- 握住手機 a 處。
- 旋轉手機 b 處，順時針鬆開，逆時針鎖緊。
- 更換完畢後，請確認手機前後端 c 處是否旋緊。

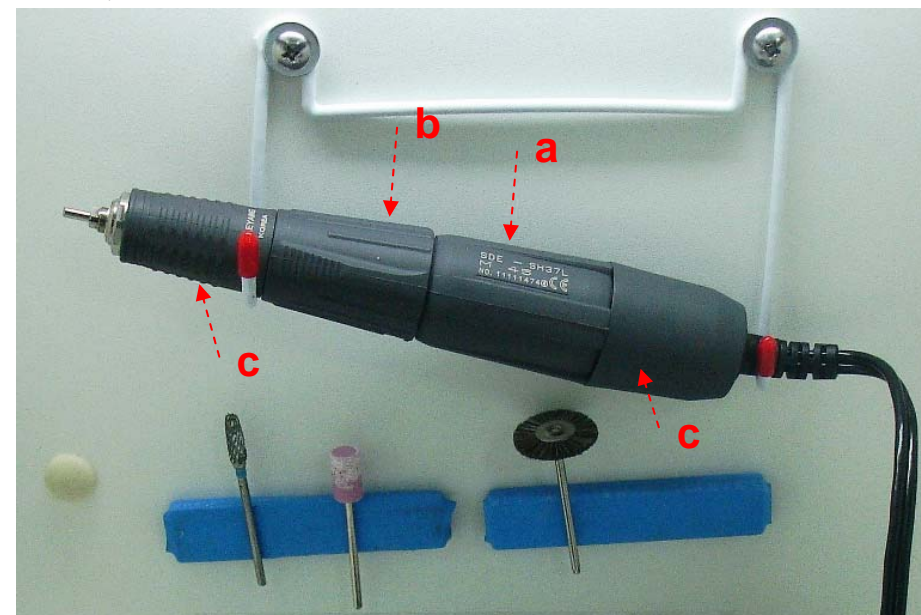


4. 如在使用中，手機停止轉動時，請按插座旁的重置鍵。



3. 放大鏡：

1. 放大鏡後方有內建磁鐵，可吸附於機台上任何金屬表面。

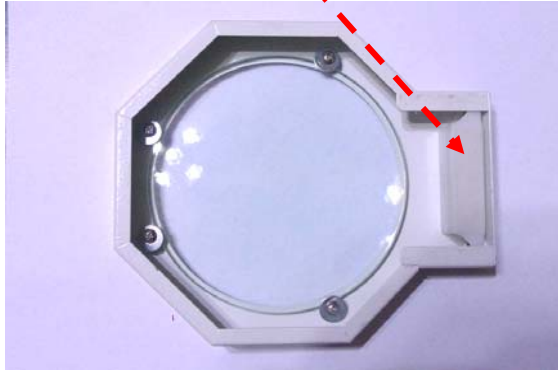

(選配)


4. 噴砂筆

1. 按下方型中的圓鈕，啟動空壓機。



2. 容器：

- a. 空瓶中，可放置氧化鋁、噴砂小蘇打或其他最大至 100um 噴砂用粉。
- b. 瓶中放置棉花，以過濾空壓機水氣。

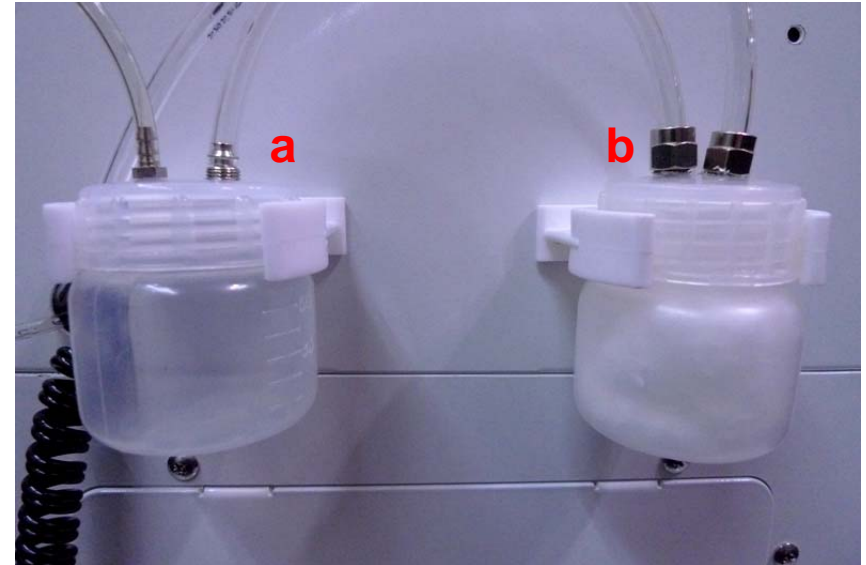

3. 清除過大砂粒：

a. 懸下噴砂筆前端筆蓋。



b. 按住透明軟管並向前推出。




- c. 取下鎢鋼噴嘴並清除過大砂粒。
- d. 清除砂粒後，將噴嘴塞回透明管內。
- e. 將鎢鋼噴嘴連同透明管輕輕向後推，直到停止，並鎖上前端筆蓋。

5. 清潔研磨後顆粒及粉塵


1. 取出金屬濾網，並清除網內顆粒。清除後放回。



2. 旋開集塵箱蓋的 2 顆旋鈕。

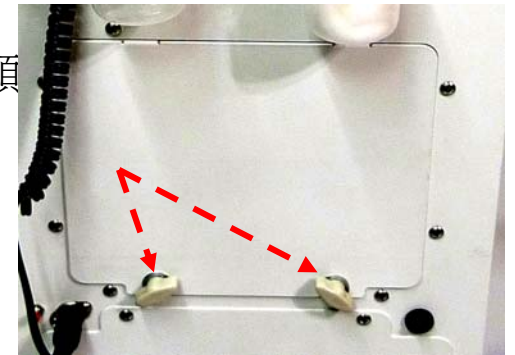

3. 將集塵帶順時針轉出後，新集塵帶逆時針旋上。

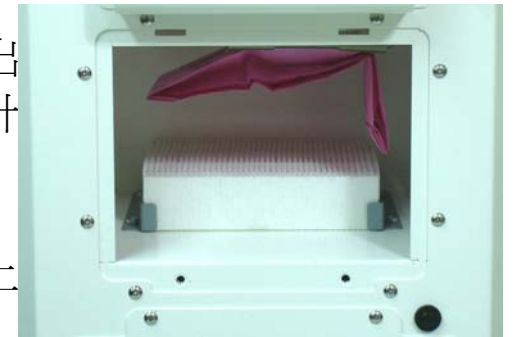

4. 蓋上集塵箱蓋並鎖上 2 顆固定旋鈕。

*如遇任何無法排除問題，請聯絡購買之經銷商。

